

Hvis du mister en plade i PSPiX scanneren

Hvad skal du bruge:


- 1 stk. Unbraconøgle (sekskantet) 2,5 mm
- 1 stk. Unbraconøgle (sekskantet) 3 mm
- 1 stk. Pincet

Hvor lang tid tager det:


Ca. 10 minutter

At udtage en mistet plade i scanneren forholdsvis nemt.

Først afmonteres pladeholderen forrest på scanneren, dette gøres ved at trække holderen væk fra scanneren. Herefter afmonteres begge kabler på bagenden af scanneren, der er en lille klip på netværkskablet som skal klemmes ind inden kablet trækkes op. Herefter vendes scanneren på hovedet, husk underlag.

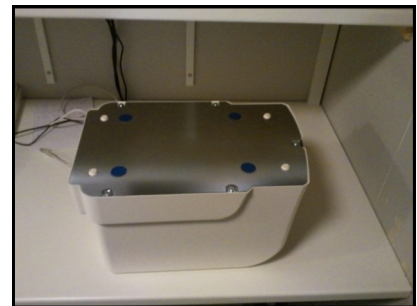

Først afmonteres de 4 skruer som sidder i bunden, herefter holdes låg og bunden sammen mens scanneren vendes om igen. Så løftes låget forsigtigt op og tippes mod fronten af scanneren. **PAS PÅ KABLET.** Der sidder nu 2 skruer på hvert side på den sorte plade som afmonteres. Hvis der er to bag på, løsnes disse også.

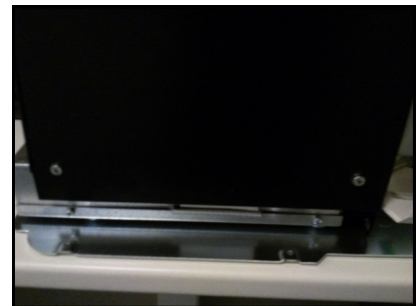

Den sorte kasse kan nu forsigtigt løftes af og lægges til side. Med en pincet kan den mistede plade nu forsigtigt fiskes ud uden at ramme de mekaniske dele.



Den sorte kasse kan nu forsigtigt monteres igen, skruerne skrues i, låget sættes på og scanneren vendes om hvor skruerne i bunden monteres, kablerne sættes i og scanneren tændes. Færdigt arbejde.